

PROHS[®]
SMARTLINK

SOFTWARE PROHS SMARTLINK

O software PROHS SMARTLINK oferece supervisão do ciclo de esterilização em tempo real e armazenamento dos dados do ciclo. O software está em contato permanente com o ecrã do esterilizador, permitindo controlo e monitorização contínua do ciclo de esterilização sem prejudicar o funcionamento normal do processo de esterilização.

No final do ciclo de esterilização, é gerado um relatório com todos os valores relevantes do ciclo. Os dados são guardados e armazenados e podem ser visualizados sempre que precisar.

O software PROHS SMARTLINK também permite a interação direta com o Esterilizador, ou seja, no modo de visualização é possível dar instruções ao Esterilizador.

Se o utilizador desejar, também é possível visualizar o gráfico de esterilização.

Existem duas opções para ligar o Esterilizador Horizontal a Vapor PROHS com o software PROHS SMARTLINK :

INSTALAÇÃO LOCAL

Este tipo de instalação pode incluir até 4 esterilizadores. Estes podem ser ligados localmente por meio de interfaces RJ45.

Os plugues de conexão devem ser fornecidos em locais acessíveis aos esterilizadores e à estação de trabalho (PC).

Um número de endereço IP fixo deve ser fornecido ao esterilizador e ao PC, esta informação é crucial para configurar o hardware.

INSTALAÇÃO DE DOMÍNIO.

As condições exigidas são iguais às do sistema de instalação de rede (IP fixo e configurações de rede).

Além disso, é necessário fornecer um nome de utilizador no servidor onde os dados serão armazenados, criando uma partição específica.

A integração da estação de visualização e dos esterilizadores no domínio será feita em conjunto com os serviços de informática do hospital no momento da instalação.

REQUISITOS

Todos os equipamentos devem ter uma porta RJ45 padrão.

Requisitos mínimos da estação de trabalho:

PROCESSADOR

Intel® Atom D525 Dual Core 1.66 ghz.

RAM


2 GB ddr3 667/800 (4 gb)

HDD

2.5 320 GB SATA

ECRÃ

Touch-screen LCD 15.6" 16:9 (resolução de 1366 x 768)

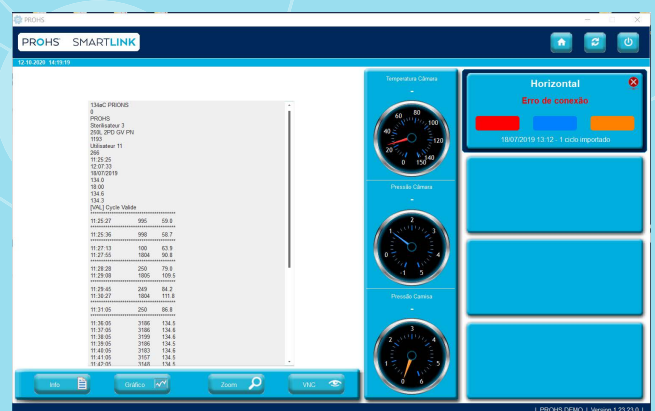

PROHS Equipamento Hospitalar e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
4475-122 Maia – Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt